


**GR
EN**



IFU rev2..0_07/2018

Kerekesszék használati utasítás

**MOBIACARE**[®]
MEDICAL EQUIPMENT

Ref.: 0808383,0808483_0810170_0808487

CE

ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy a kerekesszék megvásárlásával, a MOBIAK termékeibe fektette a bizalmát. Ez a használati utasítás, segítséget nyújt a termék rendeltetésszerű használatában, és hasznos tanácsokkal látja el a biztonságos használat érdekében. Az alkalmazás előtt, kérjük alaposan és körültekintően olvassa el a használati utasítást. Amennyiben kérdések merülnének fel a termékkel kapcsolatban, tanácsra vagy segítségre van szüksége keresse a viszonteladót, ha kétségek merülnének fel önben azt javasoljuk, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, aki további tájékoztatást adhat.

Figyelmeztetés: használat előtt ellenőrizze le az összes alkatrészt, hogy szállítás közben nem sérültek vagy rongálódtak meg. Ha sérülést tapasztal ne használja a terméket, és további instrukciókért lépjen kapcsolatba az eladóval.

TERMÉK LEÍRÁS

A Mobiak kerekesszékei, azoknak az embereknek lettek tervezve, akik fizikai vagy mentális szempontból hátrányos helyzetűek és ezért korlátozott mozgási szabadsággal rendelkeznek vagy nem képesek önálló mozgásra. Az utasítás a legutóbbi specifikációk alapján és a publikálás idején rendelkezésre álló információk alapján lett össze állítva. Szükség esetén az adatok és egyéb változások jogát fenntartjuk. Bármilyen változás a termékeinkben okozhat minimális változást az utasítás le írása és az illusztráció között a termék esetében, amit megvásárolt.

SPECIFIKÁCIÓK

ANNEX A

E.C. Megfelelőségi nyilatkozat

Kategória 93/42/EEC	I
Osztályozási szabályok	1
Gyártói regisztrációs szám:	I 803 09 2021

Az orvosi eszköz direktívának megfelel :93/42/EEC

Direktíva 93/42/EEC és a Görög Nemzeti legalizáció ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648. ΦΕΚ 2198B/02-10-2009

Megfelel az ISO 13485, az orvosi eszközök minőségirányítási rendszere és ISO 9001 Minőségirányítási rendszer

A kerekesszék tervezésénél és gyártásánál a maximális biztonságot tartottuk szem előtt
A termék kielégíti a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet (EEC 89/336 illetve EEC 93/42 direktívák) előírásait

EGYÉB INSTRUKCIÓK

- A kerekesszék hátsó kerekein fékek találhatóak, amelyek a szék egyhelyben történő megállítására szolgál.
- A lábtartókra NE támaszkodjon rá beüléskor, és amikor kiszáll mert elfordulhatnak és fennáll a borulás és elesés veszélye.
- A lábtartók felhasználók kényelmét szolgálják amikor a székben ülnek
- Amikor kiszáll a székből mindkét markolaton egyenlő erővel támaszkodjon, egykezes és támaszkodás nélküli beülés sérüléssel járhat.
- NE hagyja a kerekesszéket nedvesen.
- NE hagyja őrizetlenül, gyerekek közelében.

NE érintse meg mozgás közben a mozgó alkatrészeket, sérülés és balesetveszélyes.
Egyéni kiegészítőkért keresse fel a MOBIAK A.E

Beszállás a kerekesszékekbe

- Helyezze a kerekesszéket magához olyan közel amennyire csak tudja.
- Rögzítse a széket a rögzítő fék segítségével.
- Hajoljon rá a vázra a kezei segítségével és lassan húzza magát a szék felé.
- Engedje ki a rögzítő féket.

Kiszállás a kerekesszékből

- Pozícionálja a kerekesszéket amilyen közel csak tudja a kívánt hely mentén, ahova szeretne átülni.
- A súlypontja áthelyezésével mozogjon a kívánt helyre, ahova szeretne ülni.

KARBANTARTÁS

A rendszeres ellenőrzés, és következő pontokban összeszedett procedurális ellenőrzések, növelhetik az eszköz, hatékonyságát és élettartalmát.

HETI RENDSZERESSÉGGEL

- Ellenőrizze a kerekekben levő levegőnyomást.
- Ellenőrizze, hogy a csavarkötések és a csavarok megfelelő állapotban vannak.
- Tisztítsa meg a háttámlát és az ülő részt szappanos vízzel, vagy a tisztításhoz megfelelő termékkel.
- Tisztítsa a szék fém alkatrészeit száraz ruhával, ronggyal vagy speciálisan a króm vagy festett felületek tisztítására alkalmas termékkel.
- Ellenőrizze a kerekek csavarjait és igazítsa meg, ha szükséges
- Ellenőrizze, hogy az elülső kerék páron, vannak e sérülések.

NEGYEDÉVENTE

- Ellenőrizni és megigazítani, ha szükséges: keréktárcsák, húzókerekek, propellerek.
- Zsírozza vagy olajozza meg minden alkatrészt, amik súrlódnak vagy kopnak.
- Húzza meg a csavarokat és anyákat.
- Az általános vizsgálata a szék állapotának és bármely hiba javíttatása szükség esetén.

Kerekesszékekkel való mozgás közben ne felejtse el!

Mindig használja a lifteket és rámpákat. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, akkor közelítse meg a célállomást két segítő kísérelő segítségével. Fogják meg a kerekesszéket, a biztonságosan rögzített részeknél. A kerekesszéket az utas soha ne emelje meg, csak tolja.

TISZTÍTÁS

A karbantartás és az átvizsgálás mellett a vázat és a szövet részeket (támla) is alaposan tisztítsuk meg.

- A megjelenés karbantartásához, a szövet részeket, rendszeresen kell tisztítani,
- A kosz eltávolítható szivaccsal és enyhe mosószeres meleg vízzel az anyag (szövet) iránya felé söpörve.
- Öblítse le vízzel, mielőtt kiszáradna.
- Ne helyezze a szövetet szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell tisztítani.
- A vázat enyhe mosószerrel rendszeresen kell tisztítani.
- A bőrüléses kerekesszékeket száraz ruhával kell tisztítani.
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal, figyeljen a kerekek szárítására, veszélyes a kerekesszék használata nedves kerekkel.

Biztonsági tanácsok, Mit kell ellenőrizni használat előtt

- A gyorskioldó tengelyeket abban az esetben, ha vannak.
- A gumibroncsokat, gumibroncsnyomását és kerékszárakat. Ha a nyomás túl alacsony, vagy a gumibroncs és a kerékszárak közötti távolság túl hosszú, a kerékszárak nem működnek megfelelően.
- A maximális terhelhetőség 120 kg. A kerekesszéket használja úgy, hogy csak egyszerre egy ember üljön a székben. Bármilyen határátlépéses használat megsérti a biztonsági szabályokat.
- A felhasználó ne üljön a kerekesszékben, ha bármilyen közlekedési eszközt vezet. Ha a mozgásban lévő járművön van, a szabadon mozgó kerekesszéket megfelelő eszközökkel kell rögzíteni. Valószínű, hogy az akadályok vagy az egyenetlen terep miatt a kerekesszéket megugorhat, különösen a felfelé vagy lefelé haladva.
- Ha hajtás közben vagy billentve halad, a testét mindig hajtsa előre.

FONTOS!

- Ennek a kerekesszéknek a kialakítása során a maximális biztonságra törekedtünk.
- A jelenleg hatályos nemzetközi biztonsági előírásokat teljesítettük vagy még túl is teljesítettük őket. A felhasználók azonban a saját biztonságukat kockáztatják, ha nem megfelelően használják.
- A saját biztonsága érdekében a következő szabályokat tartsa be.
- A nem specifikus vagy inkorrekt beállítások növelhetik a balesetek kockázatát.
- Mindig viseljen világos színű (láthatósági mellény?) ruhákat mikor sötétben közlekedik, így könnyebben megkülönböztethető a többiektől.
- Az első használat alkalmával legyen óvatos.
- Ismerkedjen meg a kerekesszékkel.
- A kerekesszéket használja sík területen, a földön felfelé és lefelé.
- Ne próbálja meg elérni és elemelni azokat a tárgyakat a földről, amik csak a térdei között tud elérni.
- Ne próbáljon meg elérni úgy tárgyakat, ha el kell mozdulnia a kerekesszéken.
- Ne használja utakon és autópályán.
- Ne haladjon felfelé vagy lefelé vizes, jeges vagy olajos felületen.
- Ne használjon illetéktelen alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket, amik nem a MOBIAK által vannak.
- Ne álljon a kerekesszékre.
- Ne használja a támaszkodóként a pohártartót, amikor beleül a kerekesszékbe.



Figyelmeztetés

Probléma felmerülése esetén ne használja a kerekesszéket a probléma megoldásáig.

- Ne használja a kerekesszéket olyan célra, ami nincs feltüntetve a kézikönyvben.
- MOBIÁK A.E elutasítja az össze felelősséget,
- ami a kerekesszék inkorrekt használatából következik.
- A vállalat fenntartja a jogokat, hogy megváltoztatja a dokumentumban szereplő információkat tájékoztatás nélkül.
- Értekezzen az orvosával, a terapeutájával, hogy véglegesítse a helyes beállításokat és használatot.
- Ne engedje gyermekeknek, hogy a kerekesszékekkel játszanak.
- Ne emelje fel a kerekesszéket eltávolítható részek által.
- Tartsa távol a csomagolt kerekesszéket hőforrásoktól.
- Ki és beszállás a kerekesszékbe végrehajtható egyedül is feltéve, ha rendelkezik a megfelelő mobilitással és testi erővel.



A környezet védelme

Egynap úgy találja, hogy az eszközt át kell helyezni vagy nincs többé használatban, gondoljon a környezet védelmére:

- 1) Ne helyezze az eszközt a nyilvános hulladékba (Ezt jelenti az újra hasznosítást feltüntető jel).
- 2) Vegye fel a kapcsolatot az állami szervekkel és ők majd tájékoztatják önt az újra hasznosító központokról, amelybe az eszközt kell helyeznie.
- 3) A helyes elhelyezése az eszköznek segíti a környezet védelmét és a készülék alkatrészeinek újra hasznosítását.
- 4) Az elektromos alkatrészek alkotóelemei, ha nincs ennek megfelelően elhelyezve veszélyeztetheti a környezetet és az egészséget.

Melléklet

Először is ellenőrizzük a csomag tartalmát. Helyezze el a kerekesszéket a képen látható módon.

Az ülések oldalán található rudak egy mozdulattal való lenyomása után, a kerekesszék kinyílik és használhatóvá válik.




Használja a pántot, hogy biztosítsa, hogy a beteg lábai a megfelelő helyen legyenek.

Ezek a pántok tépőzárral vannak felszerelve és függőlegesen vannak elhelyezve a lábtartókon a műanyag alapokat elforgatva használjuk.

A kerekesszék olyan formában legyen használva, ahogy a képen fel van tüntetve így készen áll a használatra.

Alább fontos részleteket mutatunk be amire oda kell figyelni.

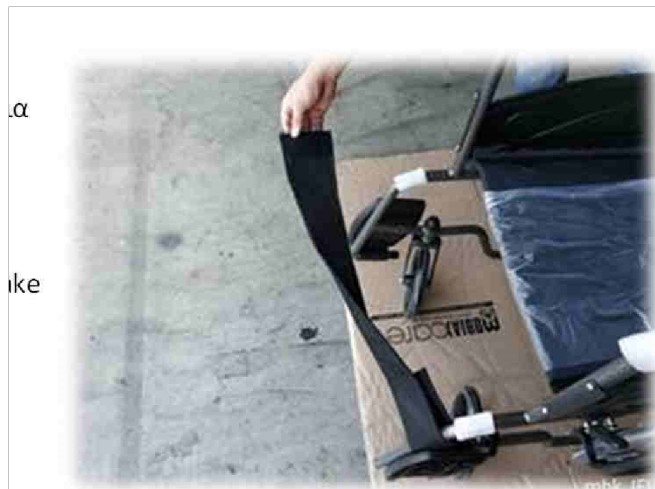

A jobb és a bal oldalon, ha lenyomjuk a kart a fő kerék előtt, akkor aktiválódik a fék.

Ha a kar kellően előre mozdul a fék rögzítve lesz hosszú távra.

Az ellenkező mozgatásával a karnak a fék feloldódik és a kerekszék újra mozgatható lesz.



Ha a kosár egy extra tárolóval van ellátva, olvassa el az alábbi utasításokat. Először ellenőrizze, hogy a csomagolás a kocsi, a tartály, a tartály alja és a tartály alja kívül van-e.

Helyezze az állványt a kerekesszékre a két párhuzamos rúd között, ahol lenyomtuk, hogy kibővítsük a kerekesszéket. Győződjön meg róla, hogy az alapkapcsok megfelelően vannak elhelyezve. Enyhén lefelé irányuló nyomással, stabilizálja a képen látható módon.



Amennyiben a bővítmény alapja be lett helyezve, fordítsa a hátára a kerekesszéket a földön, hogy láthatóvá váljanak a rögzítések.

Csatlakoztassa a tartályt úgy, hogy a nyílás a belső felület felé nézzen. A tartály oldalán látható a külső perem, amit az alkalmazási elején kell behelyezni. Meg kell jegyezni, hogy a tartály fogantyúinak párhuzamosaknak kell lenniük a kerékekkel, hogy megfelelően illeszkedjenek. Ha biztosan behelyezi a külső peremet az alaplagra, tolja dinamikusan a kerekesszék hátulja felé, amíg be nem pattan a tartály a sín végén. A művelet megfordítása esetén csatlakoztassa le az ürítő tartályt.



Helyezze vissza a kerekesszéket az eredeti állapotába. Az alaphoz és a tartálynak a képen feltüntetett módon kell elhelyezkednie. A tartálynak tökéletesen illeszkednie kell az alaphoz a szivárgás elkerülése érdekében. Most már az alap fedő ráhelyezhető eltakarva a lyukat és a hulladékot. A kerekesszék készen áll a használatra. Emlékezzen arra, hogy a tartálynak van teteje, hogy rátegye, amikor kiveszi a kerekesszék aljából diszkrét szállítás és megfelelő hulladék elhelyezés érdekében.



disposal of waste.

