

HU **AD17 GÁTTÁJÉKI RÖGZÍTŐMELLÉNY KEREKESZÉKHEZ CSATTAL / AD17P MÉLYEN KIVÁGOTT GÁTTÁJÉKI RÖGZÍTŐMELLÉNY KEREKESZÉKHEZ CSATTAL**
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



I. osztályú orvostechnikai eszköz az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 745/2017/EU rendelet (MDR) szerint, és mint ilyen, megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek.

Az orvostechnikai eszköz helyes rendeltetésének és optimális működésének biztosítása érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt első alkalommal használja. Ellenőrizze a termék megfelelő külső megjelenését és integritását, valamint a csomagolás sértetlenségét.

A CSOMAG TARTALMA: 1 kerekesszék mellény, 1 használati útmutató, 1 reklámlap.

INDIKÁCIÓK: Megfelelő törzsstabilitást biztosít a gyenge izomtónusú felhasználók számára. Megakadályozza az oldalirányú elmozdulást és gáttájéki részének köszönhetően megakadályozza a lecsúszást. Bővítés lehetősége a személyre szabott adaptációhoz a CAD16 hosszabbítóval kombinálva.

KONTRAINDIKÁCIÓK: A termék használata ellenjavallt a páciens izgatottsága esetén, valamint olyan páciensek esetében, akik leválaszthatják magukról az eszközt, vagy önállóan ki tudják oldani a csatokat. Ne használja allergia esetén valamely összetevőre.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK: Javasoljuk, hogy a terméket megfelelő végzettségű, szakképzett személy helyezze fel. A termék állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az eredeti terméket nem szabad módosítani. A termék nem érintkezhet közvetlenül sérült területtel. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizzék és kövessék nyomon a termék helyes használatát a felhasználó által. Soha ne hagyja az eszközt olyan gyermekek és / vagy személyek számára elérhető helyen, akik nem tudnak vigyázni magukra. Az alkatrészek textil jellegéből adódóan ne tegye ki a terméket hő- vagy nedvességforrásnak. Nincsenek ismert mellékhatások.

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ:

1. Helyezze a medence-részt a kerekesszék ülőkéjére.
2. Ültesse a felhasználót a kerekesszékbe.
3. Csatlakoztassa a hasi rész pántjait a kerekesszék hátulján lévő csatok összekapcsolásával.
4. Csatlakoztassa a vállpántokat a hasi pánthoz a kerekesszék hátulján lévő csatok összekapcsolásával.



AD17



AD17P


MÉRETTÁBLAZAT:

MÉRET	KITERJEDÉS
0	29X40 CM
1	39X59 CM

ÖSSZETÉTEL: 100% poliészter laminált szövet. Pánt: 100% polipropilén. Betét: 100% pamut. Csat: Acetál. Fonál: poliészter-pamut.

TÁROLÁS ÉS ÁPOLÁS: Gépi mosás legfeljebb 60 °C-on. Tilos vegytisztítani vagy vasalni. Ne szárítsa szárítógépben. Mosáskor csukja be a csatot. Ne használjon fehérítőszert.

Tárolja száraz, fénytől védett helyen, szobahőmérsékleten, eredeti csomagolásában.

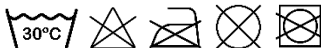


HASZNÁLAT: Terápiás céljaira tekintettel ezt a terméket más személy nem használhatja fel újra.

HULLADÉKKEZELÉS: A hulladékkezelés tekintetében a termék és alkatrészei megfelelnek a helyi hatóságok által megállapított hatályos rendelkezéseknek.

JÓTÁLLÁS: 24 hónap a vásárlás időpontjától számítva. Reklamációhoz meg kell őriznie a számlát a vásárlás igazolásaként. A terméket kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírt felhasználásra szánják. A nem rendeltetészerű használatból eredő károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá. A kártérítés az áru értékére korlátozódik. A következményes kártérítés kifejezetten kizárt.

Gyártó:

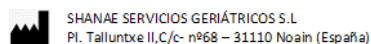

SHANAE SERVICIOS GERIÁTRICOS S.L.
Pl. Talluntxe II, C/C- n°68 – 31110 Noain (Espanña)

Forgalmazó:

Thuasne Hungary Kft.
1117 Bp, Budafoki út 60.

