



### Alumínium vázas kerekesszék IV Lion

0810806

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: ALUMÍNIUM KEREKESSZÉK, 24" HÁTSÓ KEREKEK



#### RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

A kerekesszéket mozgásukban korlátozott fizikai vagy szellemi fogyatékos emberek számára tervezték. Lehetővé teszi mozgássérültek vagy mozgásukban korlátozott személyek szállítását, és a beteg maga (ha van 20-24"-es hátsó kerekei) vagy kísérő segítségével mozgásra használható.

Ha a kerekesszék 50-60 cm átmérőjű hátsó keréssel és a keréken lévő kézi peremmel rendelkezik, a felhasználó önállóan mozoghat.

Ha a kerekesszék 13-40 cm átmérőjű hátsó keréssel rendelkezik, és nincs kézi perem a keréken, akkor a felhasználónak egy kísérőre van szüksége, aki a kerekesszéket a kerekesszék hátulján található fogantyúkon keresztül mozgatja.

## MŰSZAKI ADATOK

Lásd az A. MELLÉKLETET  
MÉRETEK

Lásd a B. MELLÉKLETET  
ÖSSZESZERELÉS

Lásd az A. MELLÉKLETET  
SZIMBÓLUMOK

Lásd a B. MELLÉKLETET

### ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a termékkel.
- Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést.
- Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtag becsípődését és sérülését okozhatják.
- Ne kísérelje meg felemelni a kerekesszéket semmilyen eltávolítható résznél fogva.
- A kerekesszékbe való be- és kiszállás önállóan is végrehajtható, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.

### FONTOS!

Ennek a kerekesszéknek a felépítése a maximális biztonságot szolgálja. A felhasználók azonban veszélybe kerülhetnek, ha nem megfelelő kerekesszéket használnak. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem meghatározott vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Mindig viseljen világos színű ruhát, ha sötét helyen mozog, hogy másoktól könnyebben elérhető legyen.
- Legyen óvatos az első edzés során ebben a kerekesszékben.
- Ismerje meg kerekesszékét.
- Használja tolószékét vízszintes talajon, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne próbálja meg tárgyakat elérni, ha térdei közé nyúlva kell felemelnie azokat a padlóról.
- Ne próbálja meg tárgyakat elérni, ha az ülésre kell felmennie.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne kíséreljen meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajréteggel.
- Ne használjon a MOBIAK által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket.
- Ne álljon a tolószékben.

### HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát. (Nincs repedés vagy törés a kereten)
2. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
3. Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen nyitva van-e. Ha nem, nyomja le az ülést az oldalsó keretről.
4. Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e.

5. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára.
6. Ha vannak gyorskioldó tengelyek, ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e rögzítve.
7. Ellenőrizze a gumiabroncsokat, a gumiabroncsok nyomását (ha szükséges) és a kerékszárakat (fékeket). A fékek nem működnek megfelelően, ha túl alacsony a nyomás, vagy túl hosszú a rés a gumiabroncs és a kerékszárak között.

#### FIGYELEM!

A következő módszereket csak tapasztalt betegeknél szabad alkalmazni. Ha nem tapasztalt, kérjen segítséget egy kísérőtől.

#### FELÜLÉS A KERESŐSZÉKBE:

1. Helyezze el a kerekesszéket a lehető legközelebb magához.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Karjával támaszkodjon a keretre, és lassan menjen le az ülés felé.

#### KIÁLLÁS A KERESŐSZÉKBŐL:

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre átszáll.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Egyformán támaszkodnia kell mindkét fogantyúra. Csak az egyik kéz megtámasztása (és felügyelet nélkül) sérülést okozhat.
4. Helyezze a testsúlyt az áthelyezni kívánt ülésbe.

#### EGYÉB UTASÍTÁSOK:

1. Mindig használjon felvonót és rámpát. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, két kísérő segítségével érheti el a célt. A kerekesszéket a keret stabil részeinél fogva kell emelniük. A tolószéket soha nem szabad felemelni, amíg az utas ül. Csak tolni szabad.
2. Kerülje a lépcsőket vagy az akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget a kísérőtől:
3. Ez a kerekesszék kizárólag személy szállítására használható az ülésen.
4. A felhasználók semmilyen közlekedési eszköz használata közben ne üljenek tolószékben.
5. A kerekesszék hátsó kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a kerekesszék nem mozog.
6. NE nyomja a lábtartókat, hogy üljön vagy felálljon, **FELKÜLÉS VESZÉLYE**. A lábtartókat a felhasználó használja, amikor ül.
7. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben **SÉRÜLÉSVESZÉLY**

#### KARBANTARTÁS:

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít megőrizni kerekesszék élettartamát és hatékonyságát.

#### HETI

1. Ellenőrizze a keréknyomást a kerekeken lévő utasításokat követve.
2. Ellenőrizze, hogy a keresztirányú kar központi csavarja meg van-e húzva és jó állapotban van.
3. Tisztítsa meg a szövetet szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerrel.
4. Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz ruhával vagy speciális króm felületekre vagy festett felületekre alkalmas szerekkel.

5. Ellenőrizze a kerécsavarokat, és szükség esetén állítsa be.
6. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az első és a hátsó kerekek.

#### NEGYEDÉVENKÉNT

1. Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be: kerékvillák, húzókerekek, légcsavarok.
2. Zsírozzon vagy olajozzon minden alkatrészt, amely súrlódásnak vagy kopásnak van kitéve.
3. Húzza meg a csavarokat és az anyákat.
4. A szék állapotának általános felülvizsgálata és a szükséges javítások.

#### ÉVENTE

1. Javasoljuk, hogy évente egyszer végezzen teljes körű felülvizsgálatot szakképzett szolgáltatóval.
2. A páciens biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőrizze a gyártó. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

#### TISZTÍTÁS:

A karbantartás és az ellenőrzés mellett a keret és a kárpit is alaposan megtisztítható.

- Annak érdekében, hogy megőrizze megjelenését, az anyagot rendszeresen tisztítani kell.
- A szennyeződések szivaccsal és enyhe mosószerrel lehet eltávolítani meleg vízzel, a textúra irányába söpörve.
- Öblítse le tiszta vízzel, mielőtt megszáradna.
- NE hagyja nedvesen a kerekesszéket.
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell megtisztítani.
- A keretet rendszeresen tisztítani kell enyhe tisztítószerrel.
- A bőrülékes kerekesszéket száraz ruhával kell megtisztítani.
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. veszélyes a tolószék használata nedves kerekkel.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszert.
- Védje a tárgyat a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

#### VIGYÁZAT (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A MOBIK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására
- Van egy  $\pm 3\%$ . Eltérés a termékek méretétől.

#### KÖRNYEZETVÉDELME

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

#### ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

#### MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

#### GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA azokra a károkra, amelyek helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából erednek. NEM takarja el azokat az alkatrészeket, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódnak, mint például a kárpit, a kerekek vagy a fékek. Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), fuvarozókra nem vonatkozik a garancia.

Semmilyen szervizre vagy pótalkatrészre nem terjed ki a fedezet, kivéve, ha azokat egy felhatalmazott szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a felhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.

#### A. MELLÉKLET ELŐÍRÁSOK

MBK CODE	GR DESCRIPTION	EN DESCRIPTION
0810804	ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ. ALU IV 41cm QR "Lion"	WHEELCHAIR ALUMINUM IV. "LION"
0810805	ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ. ALU IV 43cm QR "Lion"	WHEELCHAIR ALUMINUM IV. "LION"
0810806	ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ. ALU IV 46cm QR "Lion"	WHEELCHAIR ALUMINUM IV. "LION"

KERET: ÖSSZECSUKHATÓ ALUMÍNIUM, LEHAJTHATÓ HÁTTÁMASSZAL

SZÍN: EZÜST

ÜLÉS: SZÖVET BÉLÉSSSEL

KARTÁMASZ: ÖSSZEHAJTHATÓ

LÁBTÁMASZ: LESZERELHETŐ ÉS ÁLLÍTHATÓ HOSSZSÁG

HÁTSÓ KEREKEK: 24" SZILÁRD KÜLŐ GYORS KIOLDÁS

ELÜLSŐ KEREKEK: 8" X 2" (200 X 50mm) SZILÁRD

DŐLÉSGÁTLÓK: IGEN, STANDARD

KÍMÉRŐ FÉKEK: IGEN STANDARD

HÁTSÓ KERÉKREFLEKTOR: IGEN, STANDARD

MAX TERHELÉS: 120 KG

KÜLÖN: DUPLA KERESZT RÚD

MEGEMELŐ LÁBTÁMLÁK: OPCIONÁLIS KÓD: 0811342 & 0811343

NÁD-MANKÓTARTÓ: OPCIONÁLIS KÓD: 0811369

A KEREKESSZÉK SÚLYA HÁTSÓ KEREKEK NÉLKÜL: 12,00KG

## B. MELLÉKLET MÉRETEK

0810804	42 cm	41 cm	42 cm	42 cm	62 cm	103 cm	92 cm	49 cm	24" 8"	120 Kg	16,5 Kg	
0810805	44 cm	43 cm	42 cm	42 cm	63 cm	103 cm	92 cm	49 cm	24" 8"	120 Kg	16,5Kg	
0810806	46 cm	45 cm	42 cm	42 cm	66 cm	103 cm	92 cm	49 cm	24" 8"	120 Kg	16,5 Kg	

A tolószék, amelyet a kezében tart, eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló.

Nyitás: Fogja meg a fogantyúkat és húzza kifelé, majd nyomja le az ülés oldalán lévő rudakat, amíg a kerekesszék teljesen ki nem nyílik.



Bezárás: Kövesse a fordított eljárást.

Szerelje össze a lábtámaszt úgy, hogy az alkatrészen lévő zsanérlemezeket a kerekesszék vázán lévő csuklócsapokra szerelje. Nyomja a lábtámaszt a kerekesszék belseje felé, amíg a helyére nem kattán. Ismétlje meg ugyanezt az eljárást a másik lábtámasznál.


Távolítsa el a lábtámaszt a kioldókar megnyomásával, forgassa kifelé, emelje le a lábtámaszt a csuklócsapszegekről.



A lábtámasz hosszának beállításához használja a termékcsomaghoz mellékelt szerszámot. Lazítsa meg a csavart, és rögzítse a kívánt hosszúságra.




Használja a mellékelt lábtámasz övet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a beteg lába megfelelően helyezkedik el.

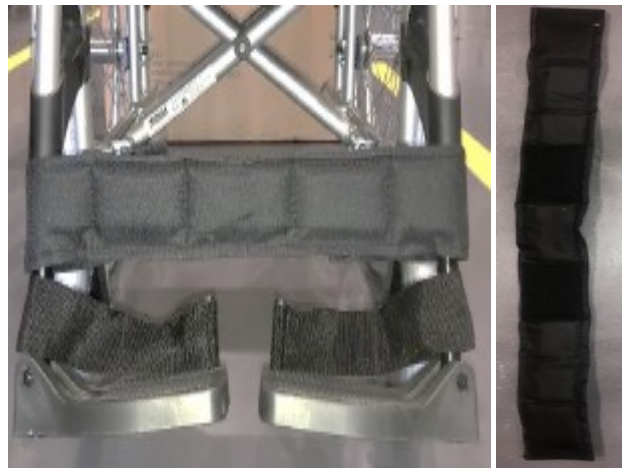


**Opcionális a 0811342 és 0811343 megemelhető lábtartók vásárlásakor**


Nem lesz szüksége a lábövre. Távolítsa el a szabványos lábtartókat, és szerelje fel a megemelhető lábtámaszokat ugyanúgy, mint a szabványost. A lábtámasz felfelé mozgatásához húzza meg a fő részt, és hagyja a kívánt magasságban. A lábtámasz lefelé mozgatásához nyomja meg a kart, és engedje le, az alsó résztől tartva. Ezt a funkciót biztonsági okokból csak a kezelőtől ajánlott elvégezni, és nem maga a felhasználó.

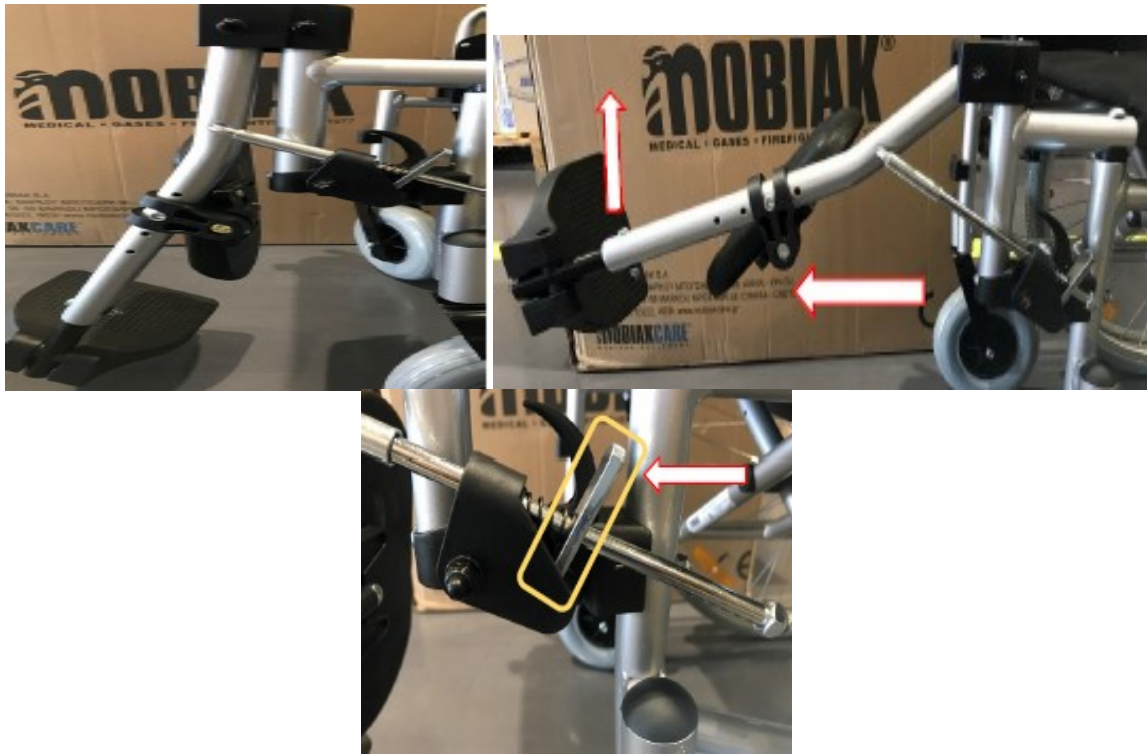

A lehajtható kartámasz felemeléséhez nyomja meg a biztonsági kart, és húzza felfelé.

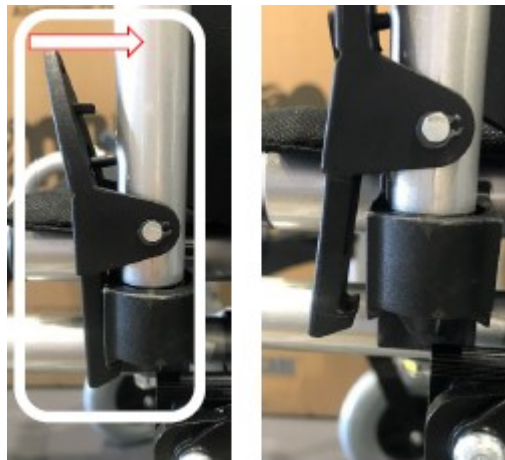


A háttámla lehajtásához nyomja meg a háttámla hátoldalán található biztonsági karokat, és egyidejűleg nyomja le enyhén mindkét oldalt.

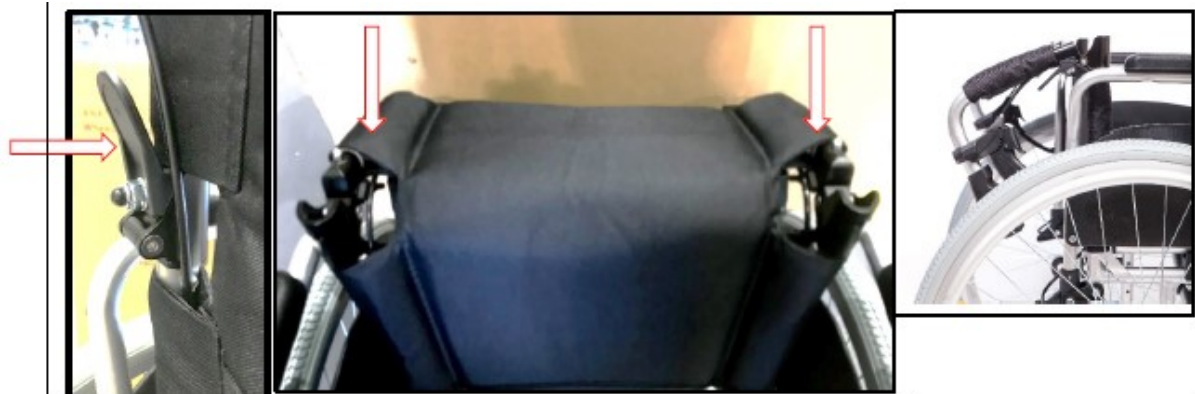



A billenésátló rendszer (a csomagban található) felszerelése a kerekesszékre (1. kép): 1) Távolítsa el a „C” kapcsot (2. kép), 2) Igazítsa az alkatrész furatát a fő keret furatához (kép# 3), 3) Rögzítse a billenésátlót a „C kapocs” segítségével (4. kép), 4) Beállíthatja a talajtól mért magasságot, és beállíthatja a kívántat: vegye ki a másik „C csipeszt” és igazítsa hozzá a három kívánt hely közül bármelyik másikat (kép #5 és #6).

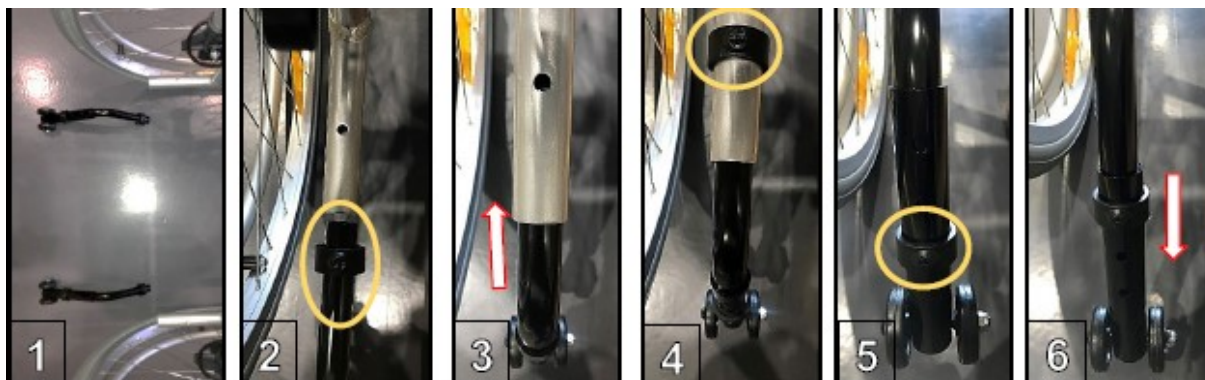


Figyelem: Mindig távolítsa el a billenésátló kerekeket, mielőtt egy lépcsőn vagy járdaszegélyen áthaladna.

Soha ne lépjen rá a billenésátlóra, és ne használja billentési segédeszközként.

A fékek a kerekesszék rögzítésére szolgálnak, ha az álló helyzetben van, hogy megakadályozza az elgurulást.

A fék bekapcsolásához nyomja előre a fékkart a tenyérrel. (1)

A fék kioldásához húzza hátra a fékkart az alsó ujjakkal (2)

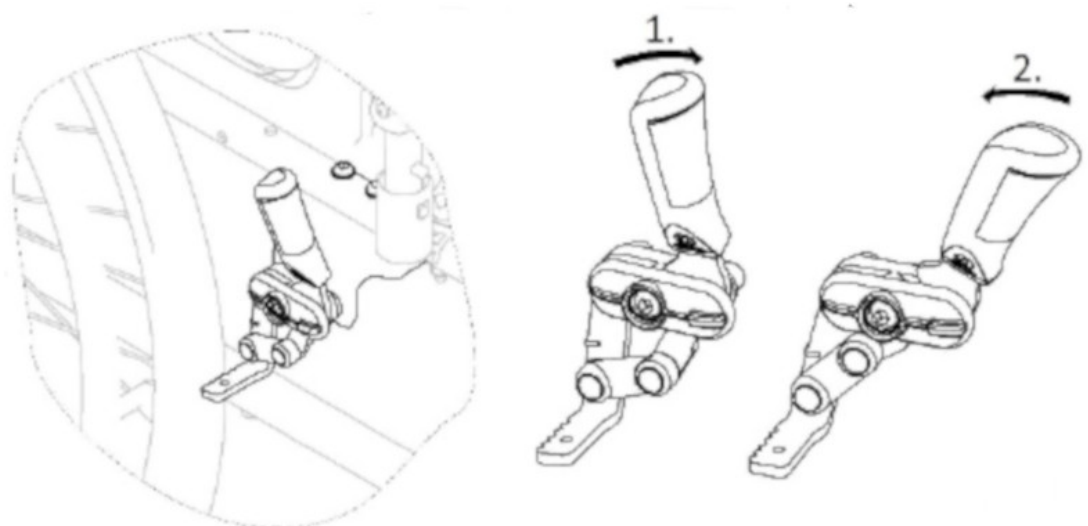

Soha ne húzza be a rögzítőféket mozgás közben.

Ne húzza be a rögzítőféket, hogy lelassítsa a kerekesszéket.

Ne támaszkodjon a rögzítőfékekre támaszkodás vagy áthelyezés céljából.


Fék használata közben tartsa távol ujjait a mozgó alkatrészekről, kezét mindig a fékkaron tartsa.

A kísérői fékekkel az asszisztens lefékezheti a kerekesszéket, miközben az mozog. A kísérő fékje rögzítőfékként is használható.


A fékezéshez húzza meg a tolókaron lévő A fékkart.

Parkoláshoz húzza meg erősen a fékkart, amíg a B biztonsági kar be nem kattant

A kioldáshoz húzza meg a fékkart, és engedje el a fékkar alatti biztonsági kart

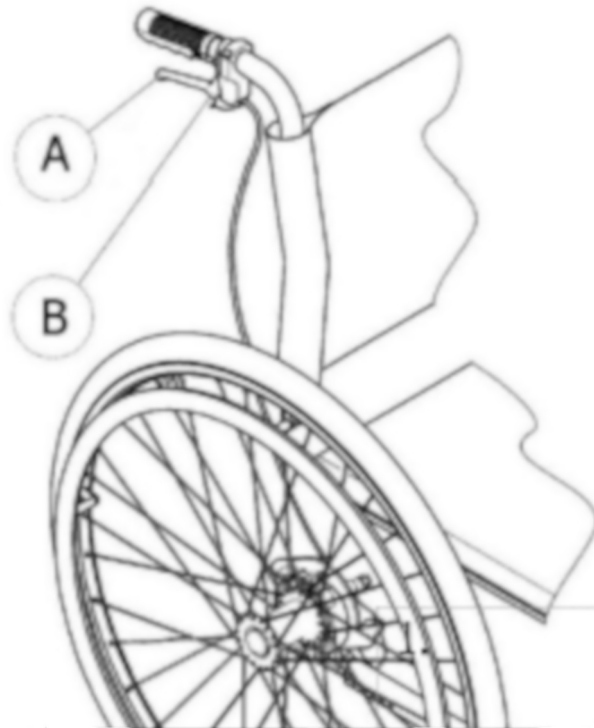

A kerekesszék biztonsági övvel is felszerelhető. (Opcionális Ref.:0806482 í 0806478 6 í 0808364 í 0809750 í 0804478). Megakadályozza, hogy a felhasználó lecsússzon a kerekesszékben vagy kiessen a kerekesszékből. A laza öv lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lecsússzon, és fulladásveszélyt jelenthet. Ügyeljen arra, hogy teljesen hátradőljön az ülésben, és hogy a medence a lehető legegyenesebb és szimmetrikusabb legyen. A záráshoz nyomja be az A reteszt a B csatkapocsba. A kinyitáshoz nyomja meg a C gombot, és húzza ki az A reteszt a B csatkapocsból.

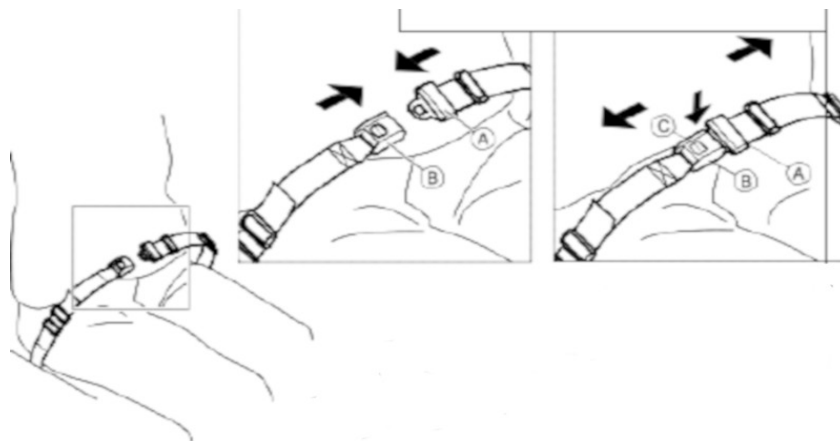

Hogyan távolítsuk el a Q.R. hátsó kerekek:

A kerekesszék hátsó kerekein gyorskioldó rendszer található, így könnyen eltávolíthatók, és csökkenthető az autóban és az otthoni tárolótérben.

A kerék szétszedéséhez nyomja meg a kerék közepén található fekete gombot a reteszeléshez, és egyidejűleg húzza kifelé a kereket, amíg teljesen ki nem jön az alapjából.

Ismételje meg ugyanezt a folyamatot a másik keréken.

Az összeszereléshez kövesse a fordított eljárást.





Orvosi eszköz



CE jelölés



Gyártó



Gyártási dátum



Termék szám



Olvassa el a használati utasítást



Széria szám



Ne használja ha a csomagolás sérült



Tétel szám



Pontosan felfelé



Egyedi  
eszközazonosító



Napfénytől távol  
tartandó



Tartsa szárazon



Rakodási magasság



Óvatosan kell kezelni



Törékeny



Kizárólag beltéri  
használat



Berendezési irányelv