



Tusolószerék állítható magasságú lábakkal

0806505

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ: ZUHANY- ÉS FÜRDŐSZÉK



RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A fürdőszéket úgy tervezték, hogy a fogyatékkal élők is élvezhessék a fürdözést, miközben ülnek rajta. Használható a csőben és a zuhanyon kívül vagy belül, csökkentve az álló helyzetből adódó izomfáradást, valamint a csúszás- és sérülésveszélyt.

MŰSZAKI ADATOK

- Állítható magasság

			
50cm	30cm	34-44cm	100kg

ÖSSZESZERELÉS:

A termék használatra készen összeszerelve. Előfordulhat, hogy össze kell szerelnie a hátsó részét vagy a fém lábakat.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg gyakran a fürdőszék minden részét. Csak nedves ruhát és enyhe szappant használjon a tisztításra szoruló felületeken. Ezután szárítsa meg jól a termék használata előtt. Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszert.

FONTOS!

Használat előtt ügyeljen a következőkre:

- Hogy a szék megfelelően legyen összeszerelve
- Hogy a lábak szorosan hozzáérjenek a padlóhoz vagy a kádhoz.



FIGYELEM

Ha a fentiek bármelyikében probléma lép fel, NE használja az ülést, amíg a probléma meg nem oldódik.

TOVÁBBI UTASÍTÁSOK

- Helyezze el a padlóra, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e ebben a helyzetben.
- Ha szükséges, állítsa be a magasságot.
- Helyezze át a felhasználót a székbe.
- A fürdés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a szék biztonságosan rögzítve van, és nem billeg.
- Ne hagyja egyedül, felügyelet nélkül a felhasználót.

KÖRNYEZETVÉDELME

Ha egy nap úgy találja, hogy eszközét ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a készüléket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti az újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba hatóságával, és ők tájékoztatják Önt a Újrahasznosító központok, amelyekbe a készülékeket kell leadni.
- 3) A készülék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét és a készülék alkatrészeinek újrahasznosítását.

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

GARANCIA

A termékre a vásárlás dátumától számított egy (1) év garancia vonatkozik. A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA a helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkat. NEM takarja el azokat a részeket is, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódhatnak, vagy víztől elhasználódhatnak, mint például a kárpit, a kerekek, a fékek, a fa, műanyag vagy fém alkatrészek. A természeti katasztrófák, a jogosulatlan karbantartás vagy javítás, az áramellátási problémák (adott esetben) és a szállítók által okozott károokra vagy hibákra nem vonatkozik a garancia. termék. A garanciális termékek szállítási költségeit a felhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.